


# Ligasano®

## Polyuretanskum för tryckavlastning

Ligasano är ett tryckavlastande och aktivt uppremsande förband av polyuretanskum. Förbandet är helt luftgenomsläppligt vilket gör att fukt och värme ej ackumuleras mot huden, detta gör att huden håller en normal temperatur. Ligasano används i förebyggande syfte och vid befintliga trycksår som uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck, samt vid otillräcklig eller utebliven blodcirkulation under längre eller kortare tid. Stoppas cirkulationen tillräckligt länge, dör ett antal celler och blodflödet får allt svårare att återvända. Inom några dagar faller de döda cellerna samman och trycksåret är ett faktum.

Hög absorptionsförmåga

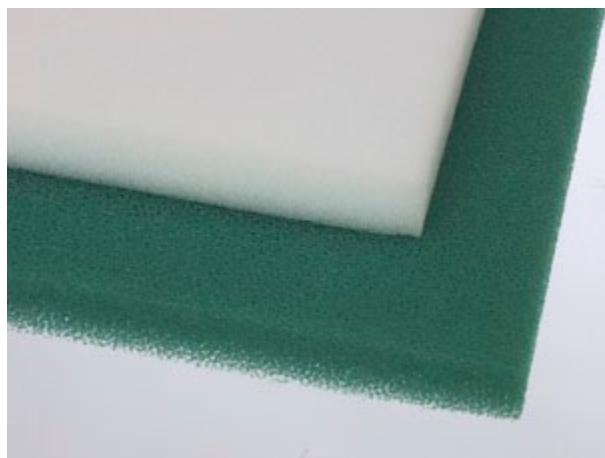

Enkel hantering

Tryckavlastande



### Indikation

Tryckavlastning i förebyggande syfte samt vid redan uppkomna trycksår. Exempel på användningsområden: mellan fingrar och tår, under bröst, i ljumskar, i händer med kontrakturer, sacrum m.m.

Kan även användas vid såromläggningar.

#### Kontraindikationer:

Den gröna klimatplattan får inte användas direkt mot huden.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Den vita LIGASANO-plattan finns i flera olika storlekar och tjocklekar. Den är enkel att klippa till och justera allt efter önskemål.

### Egenskaper vid sårhäkning

LIGASANO som upprensande förband absorberar 15-20 gånger sin egen vikt. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed risken för maceration av den friska vävnaden kring sårets kanter. LIGASANO används främst till vätskande och infekterade sår t.ex. bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador och även förebyggande mot svampinfektioner.

LIGASANO finns även i form av tamponeringsremsa och kan formas som utfyllnad i sårhålur och fistlar. Vid tamponering i fistlar ska en hel bit användas och inte flera mindre bitar. Anledningen är att man ska vara säker på att ha avlägsnat allt material när det tas bort.

### Egenskaper vid tryckavlastning

LIGASANO tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är helt luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras inte mot huden, vilket bidrar till att normal kroppstemperatur upprätthålls.

Ytstrukturen minskar sjunvningseffekten i vävnadsskiktet och minskar friktionen mot huden.

Risken för ischemi (otillräcklig blodtillförsel) minskar och därigenom uppkomsten av trycksår.

Den gröna klimatplattan används alltid i kombination med den vita plattan. Klimatplattan får aldrig läggas direkt mot huden. Bytesfrekvensen beror på sårets sekretion, förbandet skall dock inte sitta på mer än 3 dagar.

### Material

LIGASANO är tillverkad av skummad polyuretan. Den vita plattan har mindre porer än den gröna som har en grövre struktur och högre luftgenomsläpplighet.

Produkten ska inte förvaras i direkt solljus eftersom den då blir gulaktig och spröd.

LIGASANO kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 4 min.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, CE-märkt enligt CE 1275 alt. CE 0125.

### Tips

LIGASANO kan klippas och formas för alla upptänkliga konturer. Du hittar många tips i vår "Klippguide".

Patientens vikt avgör vilken tjocklek på avlastningen som är lämplig.

### Rekommenderad tjocklek på tryckavlastning:

Patientvikt	Tjocklek vid sacrum	Tjocklek vid häl
Under 45 kg	2 cm	1 cm
Upp till 75 kg	minst 3 cm	2 cm
Över 75 kg	minst 4 cm	3 cm

För att kontrollera om avlastningen är tillräcklig kan man lägga handen mellan underlaget och LIGASANO och kontrollera så att inga konturer från kroppen känns igenom.

LIGASANO tillverkas av Ligamed AG och distribueras i Sverige av HARTMANN-ScandiCare AB.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>LIGASANO® kompresser</b>	15 x 15 x 1 cm	88 21 444	10 st	11 Afp
Höggradigt ren, i ask	15 x 15 x 2 cm	88 21 445	5 st	11 Afp
	24 x 16 x 1 cm	88 21 440	10 st	6 Afp
<b>LIGASANO® tamponad</b>	3 m x 5 x 0,3 cm	88 21 449	8 st	12 Afp
<b>LIGASANO® tryckavlastning</b>	49 x 59 x 1 cm	88 21 454	14 st	6 Afp
Höggradigt ren, vit	49 x 59 x 2 cm	88 21 452	7 st	6 Afp
	200 x 50 x 2 cm	88 21 461	1 st	6 Afp
	200 x 100 x 1 cm	88 21 460	2 st	5 Afp
	200 x 100 x 2 cm	88 21 458	4 st	4 Afp
<b>LIGASANO® klimatplatta</b>	55 x 45 x 2 cm	88 21 462	7 st	4 Afp
Höggradigt ren, grön				

## Fördelar:

- Hög absorptionskapacitet
- Många användningsområden
- Luftgenomsläpplig
- Enkel hantering
- Lätt att klippa och forma
- Ekonomisk
- Kan steriliseras