

# Saphenamed® ucv

## Medicinskt kompressionsstrumpsystem

Det kan vara svårt och omständigt att själv ta på sig kompressionsstrumpor eller linda sitt eget ben. Många gånger avbryter dessutom patienten behandlingen för tidigt på grund av obehag. Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. Saphenamed, som ger önskad effekt, kan då vara ett alternativ till lindning och till klassiska kompressionsstrumpor.

Integrerad  
påtagningshjälp



Enkel att ta på

Ger ett vilotryck på  
ca 40 mmHg



### Indikation

Vid behandling av öppna bensår (Ulcus cruris venosum) och hudförändringar (Ödem, Hypodermatitis).

Förebygger återfall av bensår efter läkning. Förhindrar bensår redan vid befintliga hudförändringar (Atrophia blanche).

#### Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.

Dekompenserad hjärtinsufficiens.

Bensår med arteriellt ursprung.

Materialöverkänslighet.

Sensibilitetsstörningar på de nedre extremiteterna.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Saphenamed ucv är ett tvålayerssystem med en understrumpa och en överstrumpa.

### Egenskaper

Understrumpan är tillverkad i ett elastiskt, mjukt material som ger ett tryck på ca 18 mmHg och kan bäras både dag och natt, den fungerar också som en glidyta när överstrumpan ska tas på.

Överstrumpan har ett tryck på ca 22 mmHg. När strumporna används i kombination uppnås ett vilotryck på ca 40 mmHg vilket motsvarar kompressionsklass III. Arbetstrycket är ca 55 mmHg. Inga tryckpunkter bildas eftersom trycket fördelas över benet.

### Material

Understrumpan: 70% polyamid, 18% elastan, 9% bomull, 3% lyocell

Överstrumpan: 61% polyamid, 28% elastan, 8% bomull, 3% lyocell

Saphenamed innehåller även SeaCell, ett textilfiber med algextrakt berikat med olika mineraler, spårämnen, kolhydrater, fett och vitaminer som stödjer hudens läkningsprocess.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

### Tvättråd

Handtvätt eller skonsam maskintvätt i tvättpåse med ett normalt fintvättmedel förlänger strumpornas livslängd. Sköljmedel ska inte användas. Skölj strumporna noggrant efter tvätt.


Strumporna ska inte vridas ur, inte centrifugeras eller torkas i torktumlare. Pressa ur vattnet mellan två torra handdukar och lufttorka strumporna. Strumporna tar skada av direkt hetta t.ex. värmeelement och direkt sol-ljus, liksom strykning eller rengöring med bensin eller kemikalier.



Enkel att ta på.

### Så här mäter du!

cB där ankeln är som smalast  
cC där vaden är som kraftigast  
cD två fingrar under knävecket  
(se mätten i tabellen nedan)

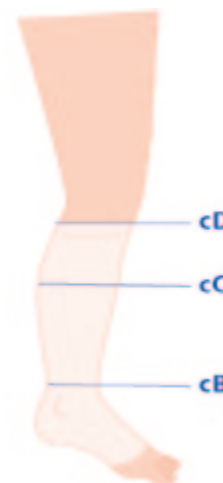

Överstrumpa



Understrumpa

Sortiment	Storlek	cB (cm)	cC (cm)	cD (cm)	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Saphenamed. ucv</b>							
1 överstrumpa,	stl 1	19 - 21	30 - 35	28 - 36	997 427	1 set	5 Afp
2 understrumpor i ask	stl 2	21 - 23	33 - 38	31 - 36	997 428	1 set	5 Afp
	stl 3	23 - 25	36 - 41	34 - 39	997 429	1 set	5 Afp
	stl 4	25 - 27	39 - 44	37 - 42	997 430	1 set	5 Afp
	stl 5	27 - 29	42 - 47	40 - 45	997 431	1 set	5 Afp
	stl 6	29 - 31	45 - 50	43 - 48	997 432	1 set	5 Afp

### Fördelar:

Terapeutisk säkerhet, rätt tryck på rätt plats

Enkel att ta på

Bekvämt att bära, designen gör att trycket inte upplevs som obehagligt

Ekonomisk, sparar tid

SeaCell vårdar huden och reglerar temperaturen